



Jos Didenybės Vyriausybė

Mėginio ėmimas tamponėliu

Nuoseklus vadovas

1

Užsimaukite pirštines arba dezinfekantu nusivalykite rankas. Tai reikalinga tam, kad neužterštumėte tyrimo rinkinio.



Vienkartinės
pirštinės

arba




Rankų
dezinfekantas

2

Patikrinkite savo rinkinio turinį:



Tamponėlis,
įdėtas į sandarų
paketėlį

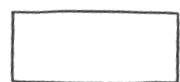

**Baltas
sugeriamasis
tamponas**



Plastikinis buteliukas,
 kuriame yra nedidelis
kiekis skysčio. **Skystis
turi likti buteliuke.**



**Maišelis su
užspaudžiama
juostele**



**Biologinio
pavojaus
maišelis su
sidabrinio
sandarikliu**



**Tyrimo gavimo
kortelė arba tyrimo
registracijos kortelė**

3



Švelniai nusišnypškite nosį į popierinę
nosinę.

Išmeskite popierinę nosinę į pateiktą
medicininių atliekų dėžę.

Tai reikalinga tam, kad neliktų perteklinių
gleivių.


4



Pažvelkite į burną ir aptikite savo
tonziles galugerklyje. Kad būtų
lengviau aptikti tonziles, galite
naudoti veidrodėlį.

**Jūsų tonzilės arba jų vieta (jei
tonzilės pašalintos) yra ta vieta,
iš kurios tamponėliu turite
paimti mėginį.**

5

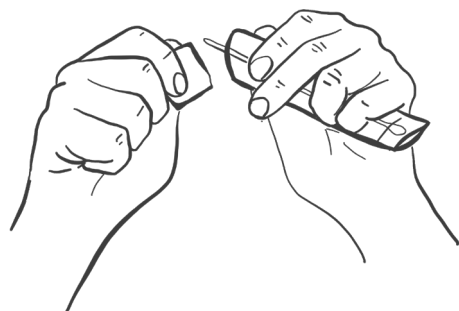

Atidarykite pakuotę ir atsargiai
išimkite tamponėlį. Jis bus
naudojamas mėginiams paimti
iš tonzilių ir nosies.

Svarbu

Tamponėlio medžiaginiu galiuku **nelieskite** liežuviui, dantų, skruostų,
dantenų ar kitų paviršių.

Jeigu tamponėlis palies minėtasias dalis, mėginys bus netinkamas ir
reikės jį imti nauju tamponėliu. Taip nutikus, paprašykite personalo
darbuotojų pagalbos.


Naudokite tą patį tamponėlį mėginiams paimti iš tonzilių ir nosies.

Imant mėginį, galima pradėti springti ar justi nedidelį diskomfortą,
tačiau neturėtų skaudėti.

Reikia pagalbos?

Jeigu turite klausimų ar problemų dėl
šio tyrimo rinkinio, kreipkitės į personalo
darbuotoją.

6

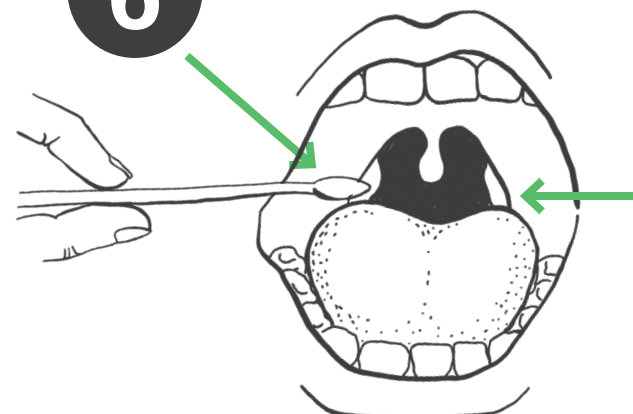

Laikydami tamponėlį rankoje,
plačiai išsižiokite ir tamponėlio
medžiaginiu galiuku **10 sekundžių**
braukite per abi tonziles (arba
toje vietoje, kur jos būtų buvę)
galugerklyje (kad būtų lengviau,
naudokite veidrodėlį).

Atsargiai ištraukite tamponėlio
pagaliuką iš galugerklio.

7



Švelniai įdėkite tą patį to paties
tampono galą į vieną šnervę, kol
pajusite nedidelį pasipriešinimą
(apie 2,5 cm nosies gilumoje).

Pasukiokite tamponėlį **10–15
sekundžių** ir lėtai jį nuimkite.

Jums paimti mėginį tik iš vienos
šnervės. Jeigu turite į šnervę įvertą
auskarą, mėginį imkite iš kitos
šnervės.

Svarbu

Mėginio ėmimas gali kelti diskomfortą. Jeigu juntate pasipriešinimą
ar skausmą, nekiškite tamponėlio giliau.

Jeigu juntate pasipriešinimą ar skausmą, nekiškite tamponėlio
giliau.




Supakuokite savo rinkinį

Nuoseklus vadovas

8



Tamponėlį į buteliuką dėkite nukreipę medžiaginį galiuką žemyn.
Nulaužkite kitą tamponėlio galą taip, kad tamponėlis tilptų buteliuko viduje nesulenktas.
Saugiai užsukite dangtelį ant flakono.

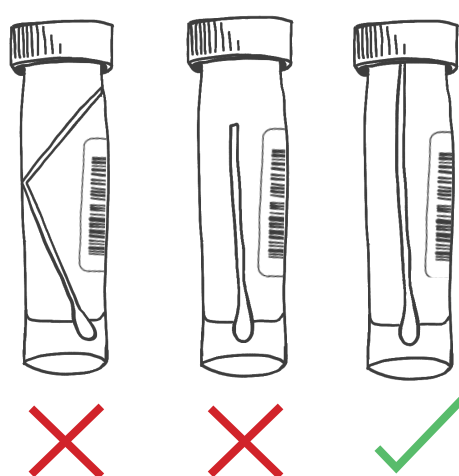


Svarbu

Saugiai užsukite dangtį taip, kad skystis nesandarus. Jums gali reikėti dangtelį užspausti.

9

- Pirma įdėkite sugeriamąjį tamponą į maišelį su užspaudžiama juoste.
- Tada buteliuką prie sugeriamojo tampono tame pačiame maišelyje.

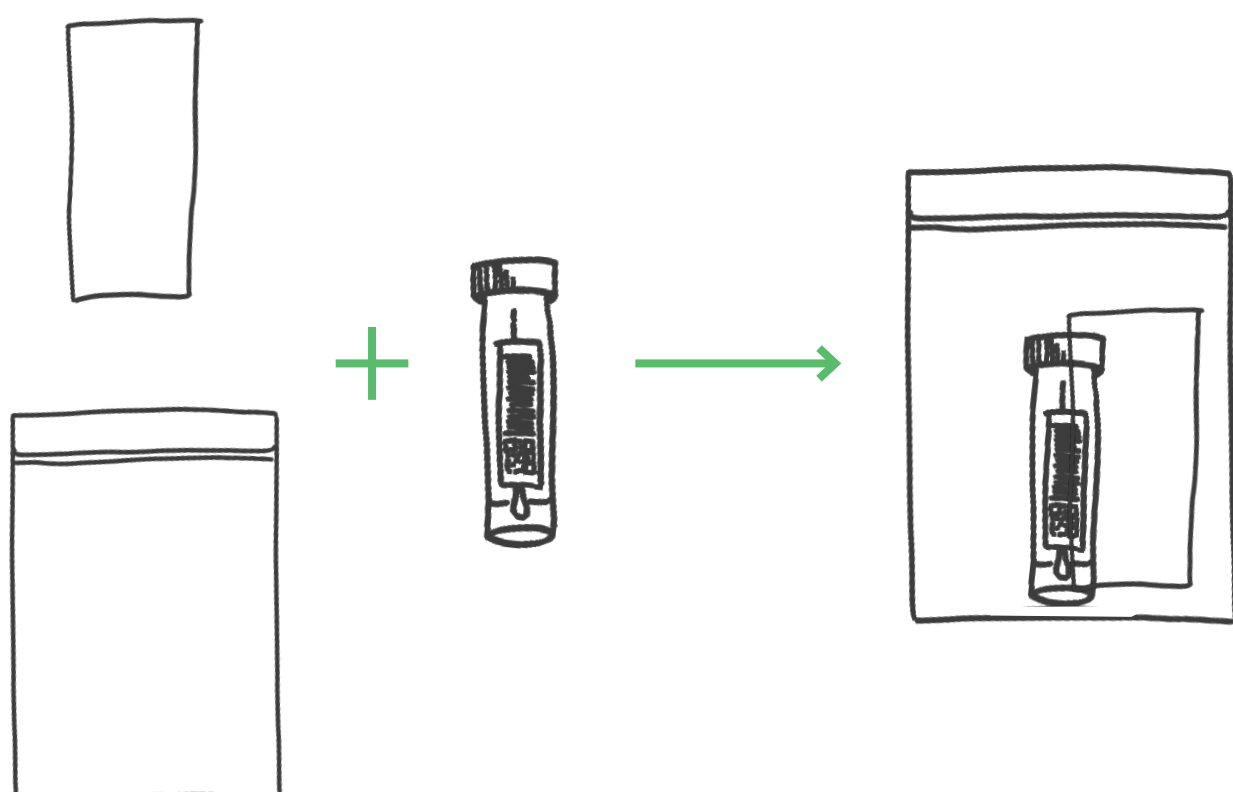


10


Maišelį su užspaudžiama juoste įdėkite į didesnį biologinio pavojaus maišelį

Biologinio pavojaus maišelio nesandarinkite.

Prieš užsandarinant rinkinį, jis turi būti patikrintas prie pateikimo punkto.

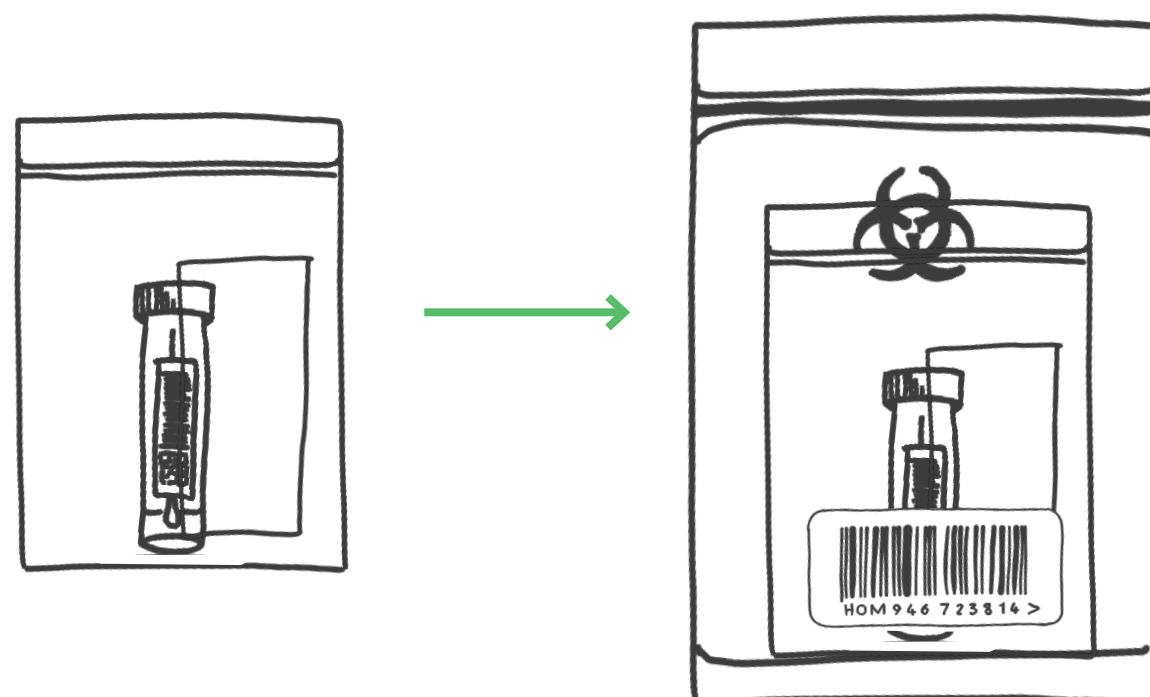


11

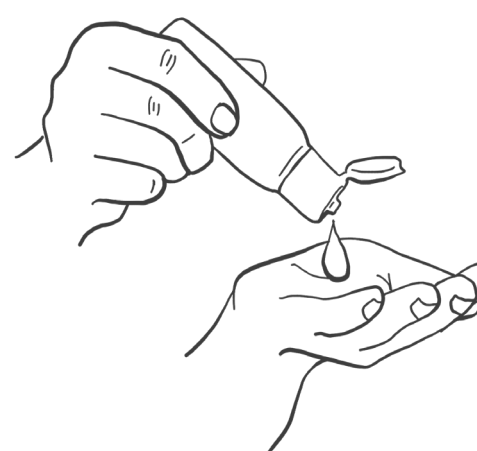

Jeigu mūvite pirštines, dabar jas galite nusimauti. Jeigu pirštinių nemūvite, nusivalykite rankas dezinfekantu.

12

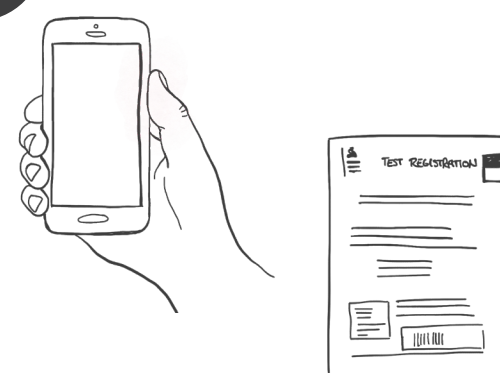

Užregistruokite savo tyrimo rinkinį

Jeigu esate gavę **tyrimo registracijos kortelę**, vadovaukitės ant jos pateiktais nurodymais.

Jeigu esate gavę **tyrimo gavimo kortelę**, pasitarkite su tyrimų asistentu.

13

Užsidėkite veido gaubtą

Prieš kreipiantis į personalo darbuotoją, būtina prisidengti veidą. Personalo darbuotojas patikrins jūsų tyrimo rinkinį ir nurodys, ką daryti toliau.

**Jūs esate pasirengę pateikti savo mėginio tyrimo rinkinį.
Pakvieskite personalo darbuotoją.**